

# Baxolve bandage dorsal combiné à un appareil EMS ou TENS

## Mode d'emploi succinct

**1ère étape:** prélevez le bandage dorsal BAXOLVE™ du sac. Sur la face interne du bandage se trouvent quatre raccordements en métal. Ici sont également imprimés les contours pour les pads d'électrodes rectangulaires spéciaux (type 612). Veuillez étendre le bandage sur une surface plane, les raccordements en métal étant placés vers le haut (ill. 1).  
Si des couvercles de protection devaient se trouver sur les raccordements, veuillez enlever ceux-ci.

**2e étape:** enlevez la feuille de protection de la face des pads où se trouve la tige métallique. Placez les pads avec la tige métallique vers le bas sur le bandage de telle manière à ce qu'ils épousent parfaitement les contours imprimés et enfoncez les tiges métalliques dans les raccordements (ill. 2/3).

**3e étape:** Veuillez ouvrir la languette en tissu afin de relier le bandage dorsal BAXOLVE™ à l'appareil de stimulation électrique. Raccordez la fiche mâle en forme de cœur (adaptateur) du câble de connexion à la fiche de raccordement adéquate dans la languette en tissu du bandage dorsal BAXOLVE™.

Au cours de l'étape suivante, enfichez l'autre extrémité du câble de connexion dans la douille de l'appareil qui se trouve sur le côté droit de l'appareil de stimulation électrique.

Refermez la languette en tissu. Avec le clip de la ceinture de l'appareil de stimulation électrique, l'appareil est fixé à la partie antérieure de la languette en tissu du bandage dorsal BAXOLVE™. (Cf. ill. 4)

**4e étape:** enlevez maintenant les feuilles de protection des faces noires des pads du bandage dorsal BAXOLVE™. Conservez ces feuilles de protection, étant donné que vous en avez besoin à la fin de chaque séance de traitement.

**5e étape:** tenez le bandage de telle manière que la bride de fixation avec le logo imprimé BAXOLVE™ se trouve sur le côté droit du bandage dorsal BAXOLVE™. La marque sur le bandage dorsal BAXOLVE™ devrait se trouver directement au-dessus de la base de la colonne vertébrale (ill. 5).  
Tirez sur les deux extrémités du bandage dorsal BAXOLVE™, faites-les passer étroitement autour du corps et fermez-les bien. Ensuite, tirez aux extrémités des bandes élastiques et fermez bien celles-ci. Vous devriez sentir immédiatement le soutien supplémentaire dans la zone inférieure de votre dos.

**6e étape:** pour la commande de l'appareil, veuillez observer le mode d'emploi s'y rapportant. Cf. chapitre préparation et traitement.

### **IMPORTANT: lors de l'utilisation du bandage dorsal BAXOLVE™ combiné à un appareil EMS ou TENS**

Lors de la mise en place, veuillez à ce que le bandage dorsal BAXOLVE™ épouse parfaitement la taille. Ceci assure une bonne pression des pads contre le peau. Deux paires de bandes de fermeture réglables facilitent la fixation.

### **Veuillez observer les points suivants:**

- La surface totale des pads doit adhérer à la peau.
- Le côté longitudinal des pads doit être à l'horizontale sur le bandage dorsal BAXOLVE™.
- Augmentez l'intensité jusqu'à ce que vous ressentiez une stimulation forte, mais agréable. La stimulation ne doit pas être douloureuse.

\* Le mode d'emploi succinct ne remplace pas le mode d'emploi!  
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi de votre appareil.



III. 1



III. 2



III. 3



III. 4



III. 5 : bandage dorsal BAXOLVE™

# Baxolve. La fascia dorsale BAXOLVE™ abbinata ad uno strumento EMS o TENS

## Guida rapida

**Fase 1:** Estrarre la fascia dorsale BAXOLVE™ dalla busta di plastica. Sul lato interno della fascia sono applicati quattro attacchi di metallo, su cui sono tracciati i profili degli appositi pad rettangolari per gli elettrodi (Tipo 612). Stendere la fascia su una superficie piana, gli attacchi di metallo sono rivolti verso l'alto (Fig. 1).

Rimuovere dagli attacchi i cappucci di protezione, se ancora presenti.

**Fase 2:** Staccare la pellicola di protezione dal lato dei pad sul quale si trova il perno di metallo. Applicare i pad sulla fascia con il perno di metallo rivolto verso il basso, in modo che coincidano perfettamente con i profili delineati e premere con forza i perni verso il basso nei rispettivi attacchi (Fig. 2/3).

**Fase 3:** Per collegare la fascia dorsale BAXOLVE™ all'elettrostimolatore, aprire la linguetta in tessuto. Collegare la spina a forma di cuore (adattatore) del cavo di collegamento al relativo connettore presente sulla linguetta in tessuto della fascia dorsale BAXOLVE™.

Nella fase successiva infilare l'altra estremità del cavo di collegamento nella presa dello strumento, che si trova sul lato destro dell'elettrostimolatore.

Richiudere la linguetta in tessuto. La clip per cintura dell'elettrostimolatore viene utilizzata per fissare lo strumento al lato anteriore della linguetta in tessuto della fascia dorsale BAXOLVE™. (ved. Fig. 4)

**Fase 4:** Rimuovere le pellicole di protezione dal lato nero dei pad sulla fascia dorsale BAXOLVE™. Conservare le pellicole di protezione, in quanto devono essere riutilizzate al termine di ogni seduta terapeutica.

**Fase 5:** Tenere la fascia in modo che il supporto dello strumento con la stampa del logo BAXOLVE™ si trovi sul lato destro della fascia dorsale BAXOLVE™. Il contrassegno sulla fascia dorsale BAXOLVE™ deve trovarsi direttamente sopra la base della colonna vertebrale (Fig. 5).

Tirare saldamente le due estremità della fascia dorsale BAXOLVE™, farla aderire bene intorno alla vita e chiuderla correttamente. Quindi tirare saldamente le due estremità delle strisce elastiche e chiuderle correttamente. Nella regione inferiore della schiena si percepirà immediatamente il maggiore sostegno.

**Fase 6:** Per l'utilizzo dello strumento rispettare le relative istruzioni per l'uso. Consultare il capitolo Preparazione e trattamento

### **IMPORTANTE: in caso di utilizzo della fascia dorsale BAXOLVE™ abbinata ad uno strumento EMS o TENS**

Nel momento dell'applicazione verificare che la fascia dorsale BAXOLVE™ aderisca bene alla vita. In questo modo si ha la garanzia che la pressione dei pad sulla pelle sia corretta. Due paia di strisce di chiusura facilitano il fissaggio.

### **Rispettare i seguenti punti:**

- l'intera superficie dei pad deve essere a contatto con la pelle,
- il lato lungo dei pad deve essere disposto orizzontalmente sulla fascia dorsale BAXOLVE™,
- aumentare l'intensità finché non si percepisce una stimolazione potente ma gradevole. La stimolazione non deve essere dolorosa

\* La guida rapida non sostituisce le istruzioni per l'uso!

Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso dello strumento.



Fig. 1

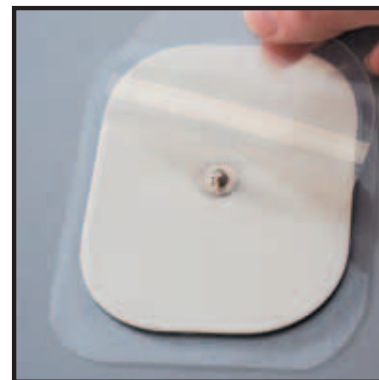


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5 Fascia dorsale BAXOLVE™